

使い捨てエプロン エプロケア®の説明

特許商品：特許第 5229509 号

- ・ 2Lの容量の大きなポケットです。
- ・ 歯磨きもベッドやテーブルでできます。



- ・ 衣類に貼り付けて、エプロンの位置を調節できます。
- ・ アゴの下までエプロンがくるように調節でき、ポケットで食べこぼしをキャッチして衣類や床の汚れを防ぎます。
- ・ 装着時の首への負荷も少なく横から簡単にセットすることができます。

- ・ 開口を維持した食べこぼしポケットで食べこぼしや食器もキャッチできます。

- ・ プラスチック製のシールをテーブルに貼付けて、ポケットの開口を確実に維持します。

- ・ 透明素材なので、エプロンを取り外そうとしません。また、装着感を感じさせません。

- ・ プラスチック製のシールなので、テーブルから剥がしてもテーブルにシールが残ることがありません。
- ・ テーブルにシールで固定するので、配膳の後でもエプロンを装着できます。

※使い捨て+大きく開口したポケットで感染予防にも効果絶大です。嘔吐などもポケットでキャッチしそのまま捨てる事ができます。


※現在、エプロンを洗って使用している場合は、本商品に変更することにより人件費の削減(洗濯+乾燥をする必要がなくなる)と共に、感染予防にもなりコストカットに絶大な効果がります。

【エプロンを洗って使っている場合】

- ・ 人件費、洗濯機代、乾燥機代、電気代が必要になる。
- ・ 食べこぼしが原因の洗濯機故障、臭い、細菌が取れない。
- ・ 洗って使用するエプロンでは、ポケットがあっても開口が維持出来るものが無いため、エプロンを使用しても衣類や床を汚してしまう。

エプロケア®の説明

特許商品：特許第 5229509 号

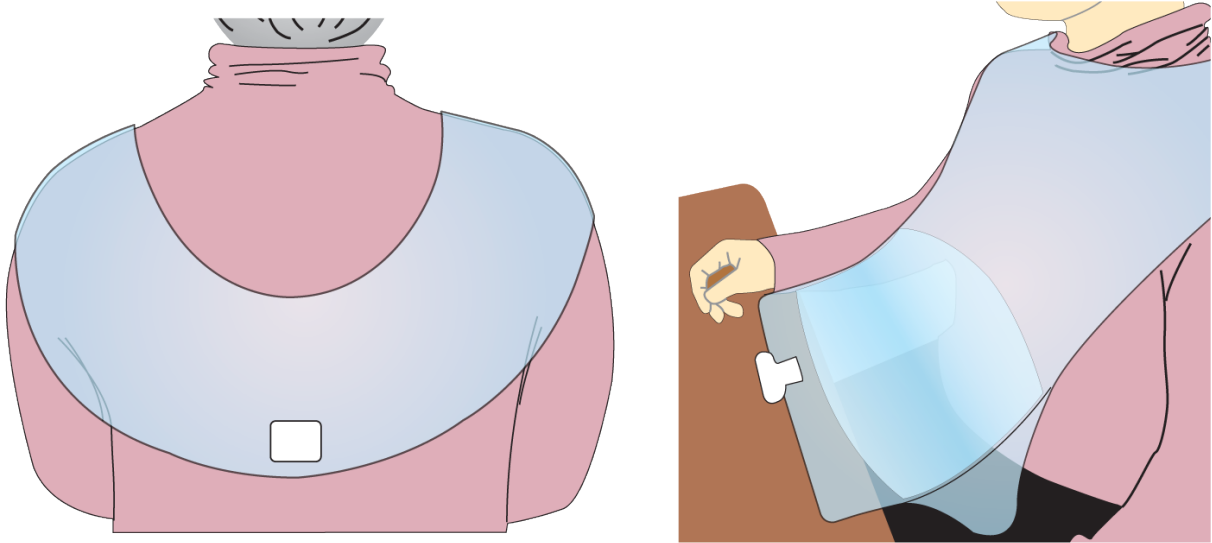

※商品は、一枚ずつ折り畳んであるので一枚ずつ取り出せます。

「エプロケア」のこだわりのポイント

食べこぼし、飲みこぼし
をポケットでキャッチ

簡単に「装着」と「取り外し」
ができる

使い捨てなので
感染予防対策に

配膳後でもエプロンを
装着できる

とても軽く、透明なので
装着感を感じさせない

「着替え」「洗濯」「掃除」の
手間を大幅に削減

従来の食事用エプロンとエプロケアの使用比較

	従来のエプロン (ポケット無しタイプ)	従来のエプロン (ポケット有りタイプ)	エプロケア
装着の タイミング	配膳前に装着	配膳後に装着可能	配膳前・配膳後 どちらでも装着可能
衣類の汚れ	エプロンが大きく テーブルと体の間に 隙間がないため衣類が 汚れにくい	テーブルと体の間に 隙間があるため 下半身の衣類が 汚れやすい	テーブルと体の間に 隙間がないので上下 の衣類とも汚れにくい
床の汚れ	一枚の布なので左右 から床にこぼれやすい	ポケットとテーブル に隙間があるので、 床にこぼれやすい	大きなポケットが テーブルと接着す るので、床にこぼれ にくい
使用後 の手間	洗濯必要	洗濯必要	洗濯不要

使用上の注意

- 本品は使いきり商品ですので再利用はしないでください。
- 火気の近くで保管及び使用はしないでください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。
- 本来の目的以外には、使用しないでください。
- シールにより、テーブルや衣類を傷つける場合があります。接着には、十分注意してください。
- 高温・多湿の場所で保管はしないでください。
- 直射日光が当たる場所での保管はしないでください。

